

Teleslyngekoffert

med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	3
I kofferten	3
Tilkoblinger	3
3. Komme i gang	4
Først	4
Legg ut teleslyngekabelen	4
Sett opp aktiv høyttaler	4
Slå på anlegget	4
4. I bruk	5
Ta i bruk mikrofonene	5
Justere lyden	5
5. Tilkobling av lydkilder	6
6. Viktig informasjon	6
7. Resirkulering	6
8. Tekniske data	6
9. Feilsøking	7

1. Innledning

Den mobile teleslyngekofferten er velegnet i de tilfeller man trenger et midlertidig tale- og teleslyngeanlegg.

Teleslyngekofferten inneholder en god teleslyngeforsterker, trådløse mikrofoner basert på den velkjente AudioLink kvaliteten (1 stk hodebøyle og 1 stk håndholdt).

I kofferten medfølger også en aktiv høyttaler som øker taletydeligheten for normalt-hørende og de med mer moderate hørselstap. Oppsett og bruk av anlegget er meget enkelt og alle tilkoblinger er på utsiden av kofferten.

2. Oversikt

I kofferten



Figur 1 I kofferten

Tilkoblinger



Figur 2 Tilkoblinger

- ① Håndholdt mikrofon
- ② Trommel med teleslyngekabel
- ③ Teleslyngeforsterker
- ④ Aktiv høyttaler m/ mikrofonmottakere
- ⑤ Strømforsyning for aktiv forsterker (løs)
- ⑥ Hodebøylemikrofon med beltesender
- ⑦ Kontakt for teleslyngekabel
- ⑧ Kontakt for tilkobling til aktiv høyttaler (linje inn)
- ⑨ Nettkontakt for 240VAC.

3. Komme i gang

Først

Åpne kofferten og ta ut alle delene bortsett fra teleslyngeforsterkeren (som er fast montert).

Legg ut teleslyngekabelen

Du må trekke ut hele kabelen, selv om rommet er lite!

Trekk ut kabelen av trommelen, og legg den langs kanten av rommet eller utenfor det området der folk skal sitte.

Koble XLR-kontakten i den "løse enden" tilbake inn i kabeltrommelen slik at en slynge dannes.

Koble så den andre enden av teleslyngekabelen inn i teleslyngekofferten ⑦.



Viktig

Hvis ikke hele teleslyngekabelen trekkes ut vil lyden forvrenges og effekten reduseres.



Teleslyngeforsterkeren blir varm under drift. Lokket på kofferten må derfor stå åpent så lenge anlegget er i bruk, og åpningen rundt forsterkeren må ikke tildekkes!

Den aktive høyttaleren plasseres på stabilt underlag omtrent i hodehøyde for tilhørerne.

Bruk den medfølgende signalkabelen og koble den aktive høyttaleren (MONO UT) til teleslyngekofferten ⑧.

Strømforsyningen kobles til kontakten merket 13,2V DC, og til vegguttaket.



Slå på anlegget

Nå kan teleslyngeforsterkerens nettkabel kobles til nettkontakten ⑨ på kofferten og til vegguttaket.

Den aktive høyttaleren slås på med bryteren merket POWER. Grønt lys tennes.

Volum reguleres til passende nivå med volumkontrollen.



Tips

Begynn med lavt volum for å unngå overraskelser.

4. I bruk

Ta i bruk mikrofonene

Den aktive høyttaleren har to mikrofonmottakere slik at begge de medfølgende mikrofonene kan brukes samtidig.

Mikrofonene leveres med oppladbare AA-batterier, men man kan også benytte vanlige alkaliske AA-batterier.

Den håndholdte mikrofonen betjenes med skyvebryteren.



Hodebøylemikrofonens sender betjenes med bryteren på toppen av senderen.



Et gult lys vil tennes bak på den aktive høyttaleren når en mikrofon slås på.



Tips

Se de medfølgende bruksanvisningene for mer informasjon om mikrofonene.

Den aktive høyttaleren har kun en volumkontroll. Lydbildet er fast innstilt til å gi best mulig gjengivelse av stemme.

Lydstyrken bør ikke stilles for høyt, men til et nivå som oppfattes behagelig for tilhørerne.

Lydstyrken i høyttaleren påvirker ikke lydstyrken i teleslyngen.



Tips

Se den medfølgende bruksanvisningen for mer informasjon om den aktive høyttaleren (stemmeforsterker).



Teleslyngeforsterkeren er riktig innstilt fra fabrikken og skal ikke justeres!



Hvis du opplever piping (feedback) er lydnivået stilt inn for høyt i forhold til hvordan mikrofonen benyttes eller hvor du står i forhold til den aktive høyttaleren.

Forsøk å skru ned lydstyrken, flytte deg utenfor høyttalerens "lydfelt" og bruk mikrofonene nærmere munnen.

5. Tilkobling av lydkilder

På baksiden av den aktive høyttaleren er det 2 linjeinnganger med phono-kotakter. Her kan det tilkobles eksterne lydkilder som f.eks. PC og MP3-spiller.

6. Viktig informasjon

- Alle delene i teleslyngekofferten kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Ingen produkter må ikke utsettes for regn / vannsøl.
- Temperatur: -10°C-+40°C
- Teleslyngekofferten skal ikke benyttes eller lagres der det er kondenserende luft.

7. Resirkulering

Teleslyngekofferten med produkter skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Riktig håndtert vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

8. Tekniske data

Frekvensområde, audio:	100 – 12000 Hz
Radio båndbredde:	783 – 832 MHz
Bruksområde:	Innendørs.
Nominell driftsspenning:	230VAC (teleslyngeforsterker)
Strømforsyning/Lader:	13,2V DC (aktiv høyttaler)
Slyngekabel:	40 meter

9. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Ingen lyd og ikke grønt lys i power-knapp	Strømforsyningen er ikke tilkoblet	Koble til strømforsyningen i aktiv høyttaler og i kontakten på veggen.
Ingen lyd i høyttaleren, men grønt lys.	Lydnivået står for lavt	Skrue opp lydenivået med volumkontrollen.
Ikke gult lys bak på aktiv høyttaler	Mikrofonen er ikke påslått.	Skrue på mikrofonen
Ikke gult lys bak på aktiv høyttaler	Mikrofonen er på feil kanal.	Still inn riktig mikrofonkanal. Bruksanvisninger.
Det er ikke lyd i teleslyngen	Teleslyngeforsterkeren mangler strøm.	Koble til 230VAC.
	Signalkabelen er ikke tilkoblet.	Koble signalkabelen til teleslyngekofferten og aktiv høyttaler.
	Teleslyngekabelen er ikke riktig tilkoblet.	Sjekk tilkoblingene
	Det er brudd i teleslyngekabelen.	Om mulig: mål om kabelen er OK. Hvis ikke må den repareres.
Dårlig/ingen lyd i teleslyngen	Teleslyngekabelen er ikke trukket helt ut av trommelen.	Trekke kabelen elt ut og legg den ut over gulvet.
	Teleslyngekabelen ligger uhensiktsmessig.	Forsøk å legge kabelen bedre i forhold til tilhørerne.
	Det er metall i gulvet eller der kabelen ligger.	Forsøk å løfte kabelen litt over gulvet.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 3347 3347.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord
tel. 3347 3347 / Epost: post@vestfoldaudio.no

